

Lupa 2.5x con clip para ajustarse a frascos de medicamentos

¡Felicitaciones por escoger tu nueva lupa MagniRx! Para alcanzar su desempeño óptimo, sigue las instrucciones para su uso y cuidado.





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aumento: 2.5x	Peso: 0.03 kg	Dimensiones: 5.8 x 6.4 x 3.8 cm
---------------	---------------	---------------------------------

MODO DE USO

1. Despliega la lupa hasta abrirla completamente. Abre los brazos de la lupa para insertar el frasco de medicinas. El frasco quedará firme en el soporte.
2. Ajusta la lupa sobre la etiqueta. Dependiendo de tu grado de visión, acerca o aleja la lupa hasta lograr el enfoque correcto.

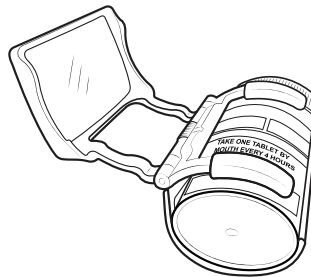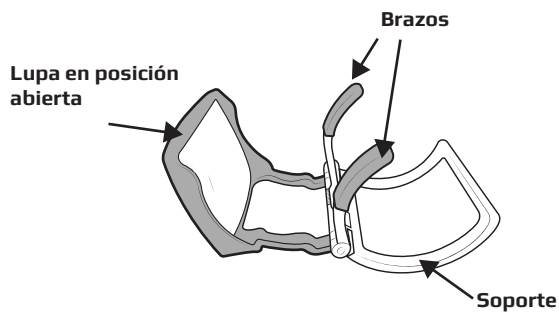

CUIDADO

Limpie la lente con un paño de microfibra. No use productos químicos, abrasivos ni solventes.

Servicio al Cliente:

Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000