

Loupe pour flacons de médicaments 2,5x

Félicitations pour le choix de votre nouveau MagRx ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriées.




SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Grossissement : 2,5x	Poids : 0,03 kg	Dimensions : 5,8 x 6,4 x 3,8 cm
----------------------	-----------------	---------------------------------

UTILISATION DE LA LOUPE

1. Mettez la loupe en position ouverte. Soulevez les bras pour insérer le flacon de médicament. Le flacon de médicament reposera contre le support.
2. Ajustez la loupe sur l'étiquette. Selon votre vision, vous devrez peut-être rapprocher ou éloigner la loupe jusqu'à ce qu'elle soit focalisée.

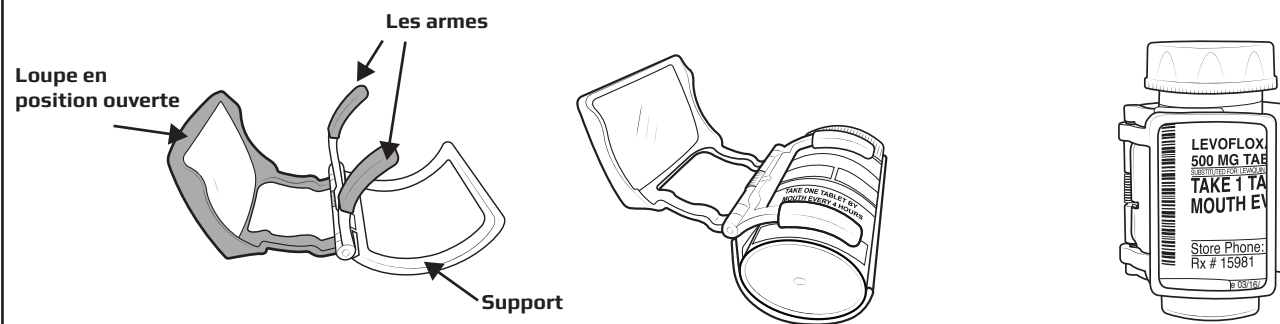

SOINS

Nettoyer à l'aide d'un chiffon nettoyant en microfibre . N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyants chimiques ou de solvants .

Service clients :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter . Nous serons très heureux de vous assister .



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'information par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000